



Diagnoestrus RAL

Es un kit que contiene todos los reactivos necesarios para la determinación de la ovulación en la perra mediante la tinción de **SHORR simplificada** de frotis vaginales.

El kit se presenta en dos cajas separadas:

Caja A que contiene los reactivos de coloración.

Caja B con los componentes de lavado.

Diagnoestrus RAL constituye el producto idóneo para el seguimiento de la queratinización de la células epiteliales superficiales por una progresiva eosinofilia. Permite detectar de manera precisa el momento de la ovulación de la perra y por lo tanto determinar el momento de la monta o la inseminación artificial.

Indicaciones

Saber en que fase del ciclo sexual de la perra nos encontramos, para:

- Determinar el mejor momento para la monta o inseminación artificial.
- Apreciar la ciclicidad
- Utilizar los progestágenos en el momento oportuno
- Confirmar una supuesta monta
- Realizar un aborto de conveniencia

Buscar una anomalía del ciclo sexual

- Anestro prolongado
- Celos silenciosos
- Estro tardío o precóz

Buscar algunas patologías

- Infecciones genitales
- Afecciones tumorales

Ventajas

- Manipulación: 20 minutos
- La queratinización de las células vaginales resalta por la aparición de un color rojo (eosinofilia). Las células no queratinizadas desarrollan un color azul (basofilia).
- Se venden por separado las cajas A, B y el Citofijador RAL.
- Almacenaje a temperatura ambiente
- Estabilidad: 12 meses.

Diagnóstico Médico Veterinario

Apartado 125 08197 Valldoreix Tel 902 998 438 Fax 933 931 908 Email: dmv@dmv.ee

<http://www.dmv.es>